



ATHANS***SPORT***

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CAMILLA DE MASAJE AT1081-AT1082



Gracias por comprar esta camilla de masaje ATHANSport.

Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.

Felicitaciones por la compra de esta camilla de masaje portátil. Su nueva mesa ha sido fabricada cuidadosamente bajo altos estándares, utilizando componentes y materiales de alta calidad. Con el uso y cuidado adecuados, tal como se indica en esta guía del usuario, su mesa debería ofrecer un rendimiento confiable durante mucho tiempo.

Para garantizar el uso seguro y correcto de la mesa, lea esta guía completa antes de utilizarla.

INSTRUCCIONES DE PRECAUCIÓN

Realice mantenimiento periódico a la mesa. Asegúrese de que todos los elementos estén seguros y que el cable no esté deteriorado ni deshilachado. Verifique que no haya grietas en la estructura de madera.

No sobrecargue la mesa más allá del límite de peso recomendado. Esto podría causar lesiones graves al usuario.

No utilice limpiadores a base de alcohol para limpiar el vinilo, ya que pueden dañar el material. Use agua tibia con jabón y seque con un paño.

Al usar la mesa, asegúrese de que las cuatro patas estén sobre una superficie sólida, plana y al mismo nivel.

INSTALACIÓN DE LA MESA


Coloque la mesa de lado y suelte las hebillas. Abra parcialmente la mesa y retire los accesorios.

Figura 1




Colóquese detrás de la mesa, sujete ambas asas y muévela suavemente hacia afuera para abrirla por completo. Las patas deberían abrirse automáticamente.

Figura 2

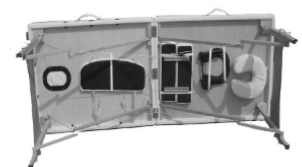

Ponga la mesa en posición vertical levantándola desde el centro. Presione hacia abajo en la parte central para asegurarse de que quede completamente plana. Si la mesa queda elevada en el centro, revise y enderece los cables.

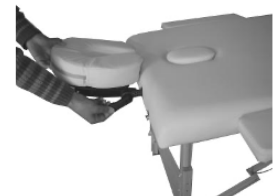

USO DE LA MESA Y ACCESORIOS

Se incluyen accesorios opcionales. Lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlos.

Reposacabezas

El reposacabezas está compuesto por una base semicircular y una almohadilla facial semicircular. Proporciona soporte cómodo para la cabeza y el rostro del cliente.

Puede haber diferentes opciones de base para el reposacabezas. El reposacabezas ajustable permite cambiar fácilmente el ángulo y la altura de la base mediante el ajuste de la manija.

Figura 3

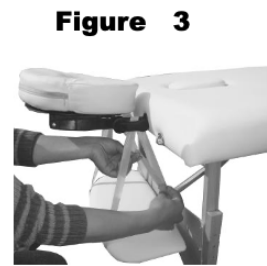


Figure 3

APOYABRAZOS AJUSTABLE FRONTAL

Este apoyabrazos ajustable es un accesorio útil para sostener los brazos del cliente en la parte frontal de la mesa.

Cuelgue el apoyabrazos en las dos barras del reposacabezas y deslice la correa hacia arriba o hacia abajo hasta encontrar la posición óptima.

Figura 4



Figure 5

SOPORTE COLGANTE PARA BRAZOS

Este es un accesorio alternativo para apoyar los brazos y cumple la misma función que el apoyabrazos frontal. Consulte las instrucciones de uso del apoyabrazos frontal.

Figura 5

EXTENSIONES LATERALES PARA BRAZOS

Estas extensiones laterales son una opción para la mesa. Los apoyabrazos laterales acolchados y removibles aumentan el ancho de la mesa. Se insertan en los orificios correspondientes para accesorios ubicados a cada lado de la mesa. Proporcionan un soporte cómodo para los brazos, especialmente para clientes de mayor tamaño.

AJUSTE DE ALTURA

La altura adecuada de la mesa depende de la estatura del terapeuta y de la técnica utilizada.

Puede ajustar la altura retirando la perilla de sujeción de cada pata.

Después de ajustar cada pata a la posición deseada, vuelva a colocar las perillas.

LÍMITES DE PESO DE LA MESA

Coloque al cliente en el centro de la mesa. Esto ayuda a distribuir el peso de manera uniforme y garantiza la estabilidad.

Al sentarse inicialmente, hágalo suavemente cerca del centro de la mesa, no sobre el borde. Luego, si es necesario, siéntese lo más cerca posible del centro desde el borde.

El peso de trabajo es la combinación del peso del cliente y la presión máxima hacia abajo aplicada por el terapeuta.

Por ejemplo, si un cliente pesa 300 libras y el peso máximo de trabajo de la mesa es de 500 libras, la presión máxima hacia abajo que puede aplicarse de forma segura es de 200 libras.

Como la presión aplicada en ángulo lateral genera considerablemente más tensión en la mesa, la presión lateral máxima no debe exceder el 50% de la presión máxima hacia abajo.

NO EXCEDA EL PESO MÁXIMO DE TRABAJO INDICADO.

Nunca exceda los límites de carga de la mesa, ya que hacerlo puede causar lesiones graves y/o daños.

ALMACENAMIENTO

Coloque la base del reposacabezas y la almohadilla facial en el elástico ubicado debajo de la mesa, como se muestra en la imagen. Guarde todos los accesorios en su posición original.

Debe utilizarse la funda de transporte al mover o almacenar la mesa para protegerla contra daños.

Cuando no esté en uso, guarde la mesa en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa. No exponga la mesa a temperaturas extremas, ya sean altas o bajas, ni a la humedad.

CUIDADO DE LA MESA

CUIDADO DEL TAPIZADO

Limpieza diaria:

Elimine la suciedad diaria de la mesa usando una solución de jabón suave y agua tibia. Seque con un paño suave que no deje pelusa.

Desinfección:

Desinfecte la mesa según sea necesario con un limpiador desinfectante de grado hospitalario a base de isopropanol, aprobado para uso en vinilo de poliuretano.

Eliminación de manchas:

Algunas manchas menores pueden eliminarse con un limpiador suave no abrasivo. Rocíe el limpiador sobre un paño húmedo y limpie suavemente para quitar la mancha. Enjuague bien con agua tibia y seque con un paño suave que no deje pelusa.

Las manchas más difíciles pueden requerir limpieza profesional.

Nota:

Nunca use limpiadores fuertes, abrasivos o químicos para limpiar la mesa. Esto puede dañar el tapizado. Evite usar protectores, ya que pueden dañar el vinilo.

CUIDADO DE LA MADERA

La mesa de masaje está hecha de maderas duras seleccionadas y tiene un acabado de laca que no requiere cuidado especial.

Si lo desea, puede pulirla ocasionalmente con un producto de calidad para el cuidado de la madera.

Mantenga la mesa seca y evite exponerla a ambientes húmedos o mojados. Si la mesa se moja, séquela rápida y completamente con un paño suave.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
Email: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por: NTK CO., LTD

